



Sidst revideret Maj 2024



Brugervejledning

Kosmetisk/æstetisk
armprotese

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care

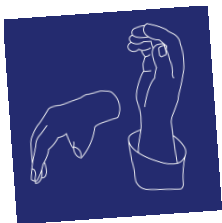

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye kosmetiske/æstetiske armprotese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Armprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Den kosmetiske/æstetiske armprotese har en passiv hånd, der er meget naturtro af den anden side. Funktionelt udgør den en opposition til den anden side og gør det muligt at holde ting, som for eksempel en bog eller pung. Desuden opnås en ligevægt i overkroppen ved brug af protesen. Den kosmetiske/æstetiske armprotese kan være med til at fjerne fokus fra den manglede legemsdel, ligesom det er muligt at anvende neglelak på fingrene af protesehånden.

Indikation

Hvor der ønskes en naturtro kopi af den anden side, og hvor æstetikken har større vægt end håndens åbne/lukke funktion. For eksempel i situationer hvor man ikke ønsker at blive konfronteret med det at mangle en legemsdel.

Materialer

Lamineret hylster, silikone-hånd, EVA skum, silikone sleeve (kunstig hud) og evt. silikone liner samt pinlås til fastgørelse af protese.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder. Levetiden på protesen er afhængig af de arbejdssituationer, den udsættes for.

Brug af produktet

Påtagning


Er der tale om underarmsprotese skubbes stumpen forsigtigt ned i hylsteret. Vær omhyggelig med at få bløddelene omkring albuen til at sidde korrekt. Ved overarmsprotese anvendes evt. en silikone-liner, der rulles på, og låsepind klikkes ned i låsen i hylsteret.

Aftagning

Ved underarmsprotese trækkes bløddelene forsigtigt op over hylsterkanten, og armen trækkes forsigtigt ud af hylsteret. Overarmsproteser trækkes af ved at udløse låsen på indersiden af protesen.

Pleje af huden

Huden plejes med hudvenlig lotion uden allergiske stoffer. Hvis der anvendes liner til at fastholde protesen, er det vigtigt, at denne vaskes dagligt i mild sæbe uden farvestof og allergifremkaldende stoffer. Husk at skylle grundigt for at få sæberester ud. Det er vigtigt, at der ikke opstår røde mærker på stumpen, som ikke aftager tyve minutter efter, protesen er taget af. Ved vedvarende mærker, skal du kontakte din bandagist.

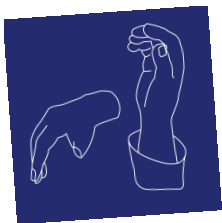

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre protesens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

Særlige risici

Ved bilkørsel kan der være behov for modificering af bilen. Du bør være opmærksom på, at der kan ske misfarvning fra handsker og tøj på protesehånden, og penol/sprittusch bør undgås. Cykling kan ligeledes medføre slitage på hånden.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Afsprit protesen engang imellem med en blød klud.

Vedligeholdelse

Hvis protesen går i stykker, skal du ikke selv reparere den, men i stedet henvende dig til Sahva.

Bortskaffelse/returnering

Når protesen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva.

Elektriske aggregater i hjælpemidler skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis, og vi anbefaler, du afleverer dem til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det.

Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

