




Sidst revideret Maj 2024

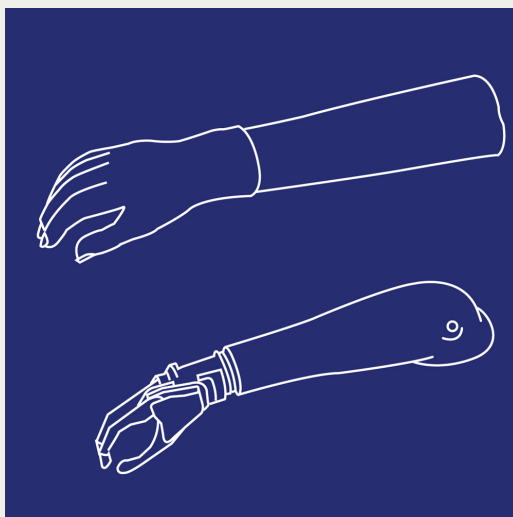

Brugervejledning


Myoelektrisk armprotese

SN

REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby

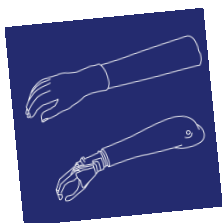

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye myoelektriske armprotese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af armprotesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Armprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Ved den myoelektriske armprotese anvendes muskelspændinger til at aktivere elektroder, der styrer håndens åbne og lukke funktioner. Herudover kan der være tale om en drejefunktion af hånd og albueled, der ligeledes styres med elektroderne. Ved at indstille elektrodernes følsomhed kan funktionen af protesehånden optimeres.

Indikation

Klienter der har god muskelstyrke og kan separere de enkelte muskelgruppers spænding. Forsyning med myoelektriske armproteser starter som regel i 3-4 års alderen hos børn, da der her opnås bedst effekt, men bandagisten foretager altid en individuel vurdering.

Materialer

Den myoelektriske armprotese består af et lamineret hylster, hvori der evt. indgår silikone. En yderhandske i enten pvc eller silikone, som er nem at skifte. En inderhandske i pvc med elektrisk hånd; herunder elektromotor for åbning og lukning af hånd samt elektroder, batteri og kabler. Protesen kan yderligere være udbygget med enten mekanisk eller elektronisk albueled samt en drejemotor.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning


Er der tale om en underarmsprotese, skubbes stumpen forsigtigt ned i hylsteret. Hvis der er et påtrækningshul i protesen, bruges en påtrækningsstrømpe. Vær omhyggelig med at få bløddelene omkring albuen til at sidde korrekt. Ved overarmsprotese anvendes evt. en silikone-liner, der rulles på, og en låsepind klikkes ned i låsen i bunden af hylsteret.

Aftagning

Ved underarmsprotese trækkes bløddelene forsigtigt op over hylsterkanten, og armen trækkes ud af hylsteret. Overarmsproteser trækkes af ved at udløse låsen på indersiden af protesen.

Pleje af huden

Huden plejes med hudvenlig lotion uden allergiske stoffer. Hvis der anvendes liner til at fastholde protesen, er det vigtigt, at denne vaskes hver dag i mild sæbe uden farve og allergifremkaldende stoffer. Husk at skylle grundigt for at få sæberester ud. Er der røde mærker på stumpen, der ikke er forsvundet tyve minutter efter, protesen er taget af, skal du kontakte Sahva.

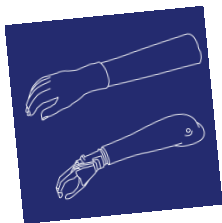

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre armprotesens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet

Særlige risici

Ved bilkørsel tilrådes det, at bilen modificeres, så den passer til dine behov. Der kan ligeledes laves særlige tilpasninger ved kørsel på motorcykel.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Afsprit om muligt protesen engang imellem med en blød klud. Undgå at fugt kommer i protesens elektroniske dele.

Vedligeholdelse

Hold protesen ren og undgå at bruge den i vandige omgivelser. Er der hul i yderhandsken, bør denne skiftes, så vand ikke kommer i kontakt med de elektroniske dele.

Bortskaffelse/returnering

Når armprotesen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet. Elektriske aggregater i hjælpemidler skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis, og vi anbefaler, du afleverer dem til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler


Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det.

Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

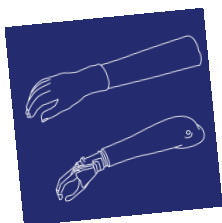

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

