




Sidst revideret Maj 2024

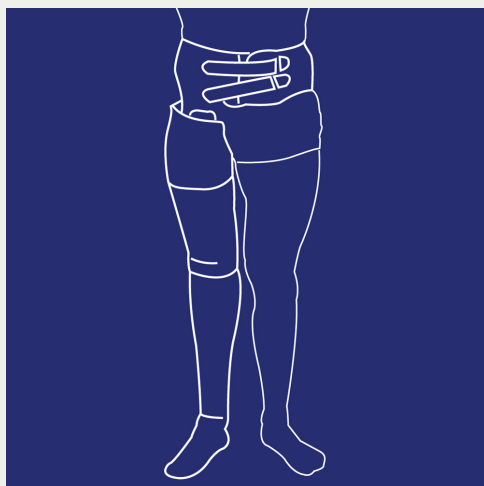

Brugervejledning

Hofteprotese
(TP/HD protese)

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care

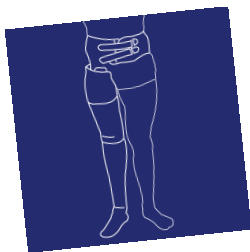

Indledning

Denne pjecce er en skriftlig vejledning om din nye hofteprotese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af hofteprotesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Hofteprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Hofteprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel samt optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Indikation

Amputation gennem hofteleddet eller gennem bækkenet, der oftest skyldes cancer eller traume.

Materialer

Hofteprotesen består af et korset/hylster, hofteled, knæled og protesefod. Hylsteret kan være fremstillet af plast, silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse. Hofteled, knæled og protesefod fås i mange variationer. Delene vælges ud fra aktivitetsniveau og vægt og fremstilles i forskellige materialer.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til omkring seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.


Pleje af huden

Det er vigtigt, at vaske huden og smøre den ind hver dag. Vask amputationsområdet med en mild, flydende sæbe, som er pH-balanceret og 100 % fri for parfume og farvestoffer. Skyl amputationsområdet omhyggeligt med vand, og tør den med et rent håndklæde. Amputationsområdet smøres ind i hudcreme for at tilføre huden fugt og blødgøre den. Hudcremen skal være pH-balanceret og 100 % fri for parfume og farvestoffer. Amputationsområdet kan med fordel smøres ind om aftenen, når protesen tages af. På den måde får cremen tid til at virke. Sørg for der altid går mindst et par timer efter indsmøring, hvis det gøres i dagtimerne, før hofteprotesen tages på. Undgå deodorant, parfume, spray der indeholder alkohol eller peelende cremer, da disse kan irritere huden.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen, og pasformen på din hofteprotese kan derfor forventes forringet; specielt de første 18 måneder efter amputationen.

Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre hofteprotesens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

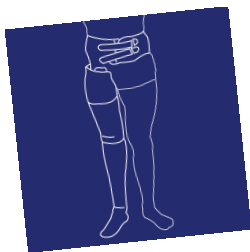

Særlige risici

Ved tryksår og hudgener skal du kontakte Sahva hurtigst muligt. Hofteprotesen må ikke benyttes i vand, hvis den ikke er særligt fremstillet til det. Udsæt ikke hofteprotesen for høje temperaturer (sauna, stærk sol eller tørring i ovn), da det kan ødelægge protesens funktion og influere på pasformen.

Hvis du har føleforstyrrelser (neuropati) i amputati-onsområdet, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener/mærker. Vi opfordrer dig til at undersøge amputationsområdet flere gange dagligt ved hjælp af et spejl.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Gør hofteprotesen ren hver aften med en fugtig klud og eventuelt uparfumeret sæbe, og lad den lufte i løbet af natten. En gang om ugen tørres hofteprote-sen over med husholdningssprit.

Hofteprotesen kræver en speciel underbuks, der skal bæres under protesen. Vi anbefaler, du tager rene på hver dag. Specielt underbuksen skal vaskes efter medfølgende vaskeanvisning. Nye underbukser udleveres hos bandagisten.

Vedligeholdelse

Sørg for god hygiejne på hofteprotesen og dens dele.

Bortskaffelse/returnering

Når hofteprotesen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres eller sendes til en af Sahvas afdelinger. Elektriske aggregater i hjælpemidler skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis, og vi anbefaler, du afleverer dem til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler


Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpe-middel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes ma-teriale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det pas-ser. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

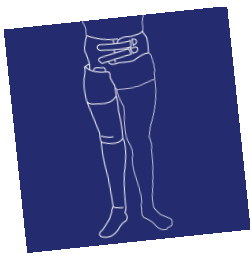

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

