




Sidst revideret maj 2024

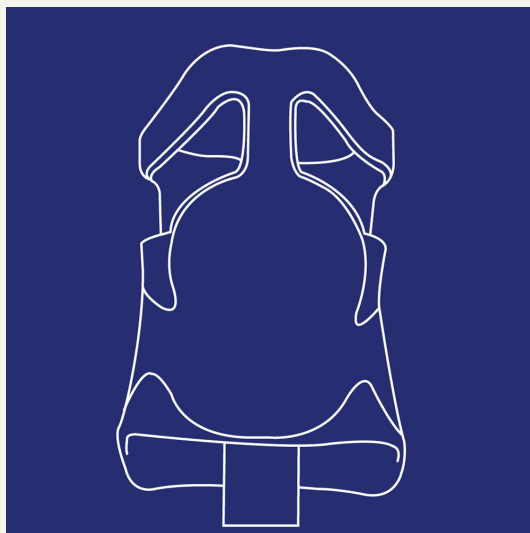

Brugervejledning

Dystrofi korset / T-korset

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care

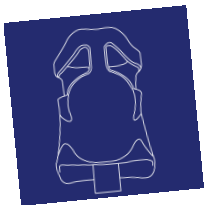

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andetsundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse bruger-vejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Opretholdelse af rygraden. Hindre udviklingen af scoliosen (krumning af rygsøjlen). Bevare en god siddefunktion.

Indikation

Neuromuskulære scolioser. Knytter sig til et bredt spektrum af patologiske forhold og specielle sygdomme. Ofte ses de progressive scolioser ved diagnoser som Spinal muskulær atrofi, Myelomenin-gocele (MMC) og Cerebral Parese (CP).

Materialer

Korsettet er opbygget i termoplastisk materiale, som er foret med en blød polstring indvendigt.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i

nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Påtagning (liggende)


- Tag undertrøjen på og sørg for, der ikke er folder.
- Tag fat med begge hænder og åben korsettet. Placer det rundt om brugeren med taljemarkeringen i taljehøjde og åbning bagpå.
- Rul først om på den ene side, og før korsettet på plads på ryggen.
- Rul om på den anden side, og luk korsettet.
- Stram den midterste gjord/velcrostrop ind til stregen.
- Stram derefter den nederste og derefter den øverste gjord/velcrostrop. Efterspænd evt. den midterste gjord/velcrostrop.
- Pas på at undertrøjen ikke rynker under korsettet, og at evt. overskydende stof trækkes ud gennem åbningen bag på korsettet.
- Kontroller at korsettet sidder lige og kommer på plads, såvel i taljen som over hofterne, og at korsettet er strammet rigtigt til.
- Korsettets to kanter skal være parallelle.

Aftagning

- Løs alle stropperne.
- Tag fat bag på korsettet, i åbningen, med hver hånd og åben korsettet. Træk derefter korsettet af.

Pleje af huden

- Tag bad hver dag. Brusebad eller karbad.
 - Bær altid en bomuldstrøje uden søm nærmest kroppen.
 - Skift undertøj ofte.
 - Anvend altid trusser uden på korsettet (bleer kan af hygiejniske årsager anvendes under korsettet).
 - Brug ikke pudder under korsettet.
 - Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, at cremen er trængt helt ind i huden, før korsettet tages på.
- Bemærk: Der, hvor korsettet skal trykke på kroppen, bliver huden ofte lidt mørkere og lillafarvet. Dette giver sædvanligvis ikke problemer. Misfarvningen forsvinder gradvist,

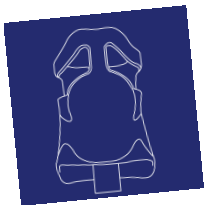

når korsetbehandlingen er afsluttet.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

Særlige risici

Trykmærker der ikke forsvinder efter 20 minutter er tegn på for højt tryk og kan udvikle sig til tryksår.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Pleje af korsettet

Korsettet skal gøres rent hver dag både indvendigt og udvendigt. Du kan vaske det med almindelig sæbeopløsning. Skyl grundigt for at undgå sæberester, der kan irritere huden. Tør bagefter med frottéhåndklæde eller viskestykke. Hvis skumgummien har suget vand, skal vandet presses ud. Lad ikke korsettet tørre ved et varmeelement eller i solen, da korsettet i så fald kan blive blødt og ændre form.

Bortskaffelse/returnering

Når korsettet ikke længere passer, eller er slidt op, kan det afleveres eller sendes til en af Sahvas afdelinger, hvis du ikke selv ønsker at beholde eller bortskaffe det.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne,

hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklameret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa- Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever degældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

