




Sidst revideret maj 2024

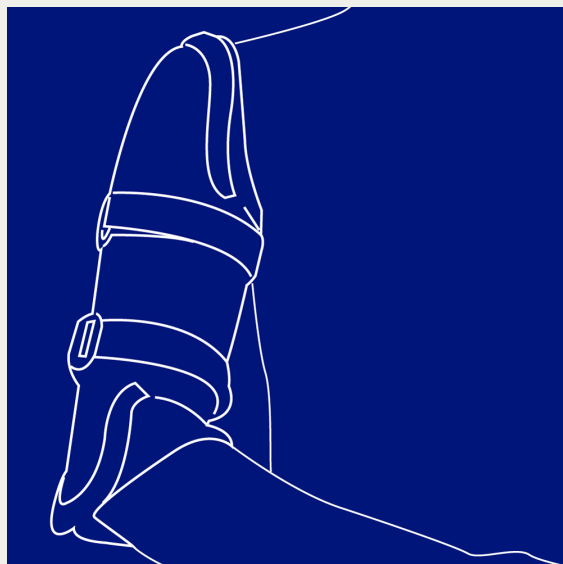

Brugervejledning

Overarmsortose
(BO-Brachial Ortose)

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care

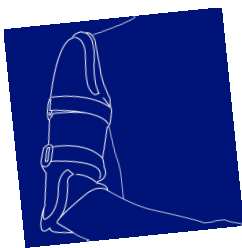

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye overarmsortose, som du har modtaget efter læge-lig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpas-ning og udlevering af overarmsortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Overarmsortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Overarmsortosen skal stabilisere nye eller ældre brud på overarmen.

Indikation

Overarmsortosen anvendes efter brud eller traume.

Materialer

Overarmsortosen kan være fremstillet i læder, plast, laminat eller en kombination af disse.

Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til omkring seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

Pleje af huden


Huden skal holdes ren og, så vidt mulig, tør. For meget fugt kan give hudproblemer. Vask huden med en parfumefri hudvenlig sæbe, og smør huden med en god parfumefri creme dagligt.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre overarms-ortosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at overarmsortosens pasform er forringet.

Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra overarmsortosen. Disse skal være forsvundet cirka tyve minutter efter, hjælpemidlet er taget af. Ved vedvarende trykgener/mærker skal du kontakte din bandagist. Hvis du har føleforstyrrelser (neuropati) i armen, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener/mærker. Vi opfordrer dig til at undersøge armen flere gange dagligt.

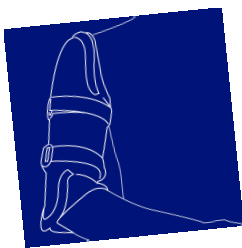

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Læder er et naturmateriale, som er rart at have mod huden. Men det suger fugt, så du må ikke vaske skindet under vand. Brug i stedet en let fugtig klud til at tørre skindet af. Det er vigtigt, at skindet får lov at lufttørre. Der må derfor ikke bruges genstande med varmeelementer som for eksempel hårtørrer, radiator mv. til at tørre ortosen. Plast og laminat kan tåle vand og sæbe, men en klud med husholdnings-sprit kan også bruges som rengøringsmiddel.

Vedligeholdelse

Almindelig rengøring efter behov.
Velcrolukninger skal holdes fri for fnug.
Derfor anbefales det, at holde dem lukket, når ortosen ikke er i brug.

Bortskaffelse/returnering

Når overarmsortosen ikke længere passer, eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpe-middel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes ma-teriale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det pas-ser. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klas-se I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk ud-styr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

MD