




Sidst revideret Maj 2024

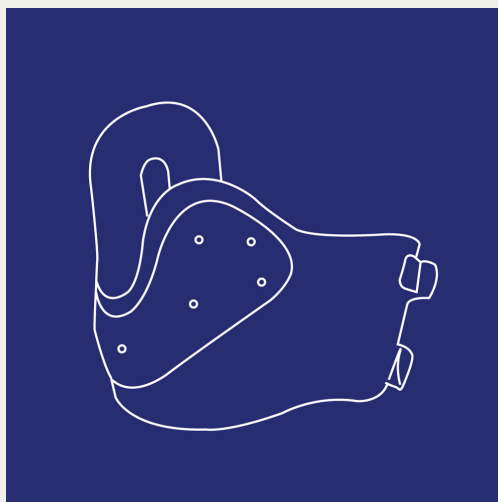

Brugervejledning

Scapula Alata ortose

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care

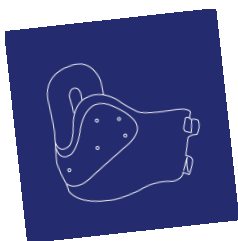

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye scapula alata ortose, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Ortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Scapula betyder skulderblad, og Alata betyder vingende. På dansk kaldes denne tilstand "englevinge". Formålet med behandling med ortose er, at holde det vingende skulderblad inde på plads for at muliggøre genoptræning af den svækkede muskulatur.

Ortosen er udformet så den omslutter brystkassen med en plastskal, som lukkes med to velcrobånd. Denne forstærkes med en bøjle i enten kulfiber eller stål omkring den implicerede side med hold bagpå skulderbladet og modhold foran under kravebenet.

Indikation

Målgruppen for behandling med en ortose er patienter med et vingende skulderblad (scapula alata).

En scapula alata opstår som følge af en markant svækkelse, af de muskler, der styrer skulderbladet. Alt efter hvilke muskler der er påvirket, udmønter det sig ved at skulderbladet vinkler i forskellige retninger, med gener/problemer til følge.

I nogle tilfælde opstår en scapula alata spontant uden nogen kendt ydre påvirkning, i andre tilfælde er det en ulykke eller virus, der er årsagen.

Ortosen skal altid ordineres af en læge, og det er den ordinerende læges beslutning i hvilke tilfælde, en behandling med ortose skønnes gavnlig; dette være sig også i tilfælde af anden diagnose end Scapula Alata.

Materialer

- Korset i termoplast.
- Ramme i kulfiber eller stål.
- Nitter i kobber og stål.
- Puder og pelotte i skumplast.
- Underfald i skumplast overtrukket med skind.
- Velcrobånd.


Ortosen bliver fremstillet individuelt over en gipskopi af din brystkasse/ryg.

Behandlingstid for midlertidige hjælpemidler

Efter lægens anvisninger.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

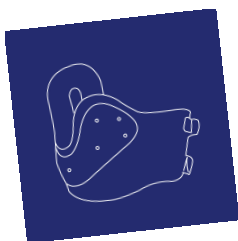

Brug af produktet

Påtagning

Inden påtagning af ortosen, anbefaler vi, du ifører dig en stramtsiddende T-shirt eller undertrøje, da dette gavner både hygiejne og komfort. Når du har trukket ortosen på, sørg for at underfaldet ved lukningen havner inden under plastkanten, og stram så de to velcrobånd.

Pleje af huden

Da huden på overkroppen er lukket inde det meste af dagen, er det vigtigt at holde den ren og tør for at undgå hudproblemer. Det kan anbefales at have en ekstra T-shirt med i tasken, så du kan skifte en eventuelt fugtig T-shirt ud i løbet af dagen. Når du har trukket ortosen på, sørg for at underfaldet ved lukningen havner inden under plastkanten, og stram så de to velcrobånd.

Pleje af huden

Da huden på overkroppen er lukket inde det meste af dagen, er det vigtigt at holde den ren og tør for at undgå hudproblemer. Det kan anbefales at have en ekstra T-shirt med i tasken, så du kan skifte en eventuelt fugtig T-shirt ud i løbet af dagen.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre ortosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at ortosens pasform er forringet.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Hvis der altid bæres en T-shirt under ortosen, er den ikke så rengøringskrævende. Man kan tørre den af med en hårdt opvredet klud med varmt vand. Ved lugtgener tilsæt eventuelt en smule Rodalon. Vær forsigtig omkring de påklistrede puder og underfald under rengøringen.

Vedligeholdelse

I de påsatte velcrobånd vil der efterhånden samle sig ”fnuller”, som gør, at de ikke holder så godt sammen. Fjern eventuelt dette ved at børste det ud med en stiv børste.

Bortskaffelse/returnering


Når scapula alata ortosen ikke længere passer, eller behandlingen ophører, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det.

Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

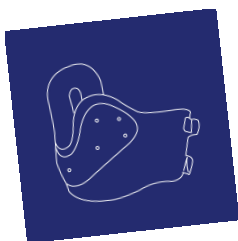

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål. Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

