



Sidst revideret maj 2024



Brugervejledning

AFO - fodkapsel (med og uden led)

SN

REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye fodkapsel, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af fodkapslen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Fodkapslen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

En fodkapsel skal immobilisere og/eller korrigere fejlstillinger i fodens led.

Indikation

En fodkapsel kan benyttes ved arthrodese, spasticitet, hypermobilitet i fod- og knæled og til børn og voksne med mangelfuld muskulær kontrol i fod og ankel og kan være med eller uden ankelled.

Materialer

I en fodkapsel kan indgå mange forskellige materialer: Plast, metal, kulfiber, skind, læder, kork.

Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Tages på som en støvle. Sørg for at hælen er helt på plads i fodkapslen, inden den lukkes til. Fodkapslen skal sidde godt fast på benet, så der ikke opstår trykproblemer.

Aftagning

Omvendt af påtagning.

Pleje af huden

Der skal altid bruges strømpe på benet, når fodkapslen bruges. Strømpen ventilerer huden lidt, og fører sveden væk. Almindelig hudpleje anbefales.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre fodkapslens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at fodkapslens pasform er forringet.

Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra fodkapslen. Disse skal være forsvundet cirka tyve minutter efter, fodkapslen er taget af. Ved vedvarende trykgener skal du kontakte din bandagist. Hvis du har ned-sat følelse (neuropati) i ben og fod, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener og mærker, og vi opfordrer dig til at undersøge ben og fod flere gange dagligt.



Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Skind er et naturmateriale, som er rart at have mod huden. Men det suger fugt, så du må ikke vaske skindet under vand. Brug i stedet en let fugtig klud til at tørre skindet af. Det er vigtigt, at skindet får lov at lufttørre. Der må derfor ikke bruges varmeele-menter som for eksempel hårtørre, radiator mv. til at tørre fodkassen. Plast kan tåle vand og sæbe, men en klud med husholdningssprit kan også bruges som rengøringsmiddel. Undgå direkte varme på plasten. Metal og kulfiber på en fodkapsel kan holdes rent med en let fugtig klud.

Vedligeholdelse

Almindelig rengøring efter behov. Led af metal vedligeholdes ved at holde dem fri for snavs og fnug, og dryppe lidt olie ind i leddet. Det kan være en god idé, at bestille tid hos bandagisten for at få en rensning af leddet, da dette vil forlænge holdbarheden. Velcrolukninger skal altid holdes lukket, for at der ikke skal sætte sig snavs og fnug i materialet. Dette vil forlænge lukningernes holdbarhed.

Bortskaffelse/returnering

Når fodkassen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpe-midler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet. Elektriske aggregater i hjælpemidler skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis, og vi anbefaler, du afleverer dem til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpe-middel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes ma-teriale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det pas-ser. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.



Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

